

Klammerentferner Manipler remover




Bestell Nr.
 Order no.
Art.-Nr.: AF.896.12

- einfache Handhabung!
- easy to use!



FUNKTIONSWEISE | HOW TO USE

Schieben Sie vorsichtig den untern Führungsarm des Klammerentferners unter die Klammer.

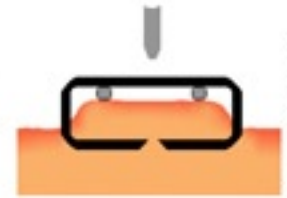

Insert the nose of the Manipler skin staple Remover firmly under the staple.

Schließen Sie den K-Entferner so das die Klammer anfängt sich zu verformen.



To reform the staple for removal,

Der K-Entferner muß vollkommen geschlossen sein so das die Klammer ganz geöffnet ist.



completely squeeze the handles until they are fully closed.

Erst jetzt können Sie die den Entferner samt Klammer von der Stelle entfernen.



With the handles closed, lift the staple straight up from the tissue.